


## Návod k použití Suplementor



Doplňkový systém SNS se používá ke krmení dětí pomocí speciálního systému nádoby a hadiček. Miminko může být krmeno buď mateřským mlékem jiné maminky nebo náhradní výživou. Podle hustoty tekutiny mohou být používány hadičky o 3 různých průměrech. Doporučujeme začínat s hadičkou o středním průměru.

SNS může být používán pro:

- adoptované děti
- děti s rozštěpem rtu/ patra
- předčasně narozené děti
- děti, které pomalu přibývají na váze
- relaxaci

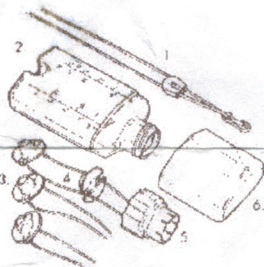

1. Šňůrka na zavěšení láhve (600.0155)
2. Lahvička, 150 ml (811.0007)
3. Hadičky s ventilkem – 3 velikosti:  
červená (800.0042) bílá (800.0041) transparentní (800.0044)
4. Držák ventilku (810.0501)
5. Šroubovací uzávěr (810.0500)
6. Ochranný kryt láhve (810.0502)
7. Lepicí páska SNS (899.0007)

### Montáž:

1. Zvolte průměr hadiček.
2. Ventil s hadičkami protáhněte přídržným ventilem. Upozornění: Netahejte za hadičky. Nejsou příliš silné a mohly by se poškodit.
3. Protáhněte hadičky s ventilem přídržným kroužkem, dokud nezapadne.
4. Naplňte láhev vhodnou náhradní výživou doporučenou lékařem.
5. Našroubujte přídržný kroužek na láhev. Hadičky upevněte do rýh na kroužku, abyste zabránili toku mléka při pověšování systému kolem krku.



6. Pověste si SNS kolem krku. Dodržte výšku umístění jako je na obrázku. Čím výš je láhev umístěna, tím je rychlejší průtok mléka.
7. Přiložte hadičky k bradavkám (asi 5 mm za bradavku) a v horizontálním směru přilepte lepicí páskou na prsy.
8. Přiložte miminko k prsu a uvolněte hadičku z kroužku, aby mohlo začít protékat mléko. Dotkněte se bradavkou dolního rtu miminka, dokud neottevírá pusinku. Jakmile si dítě přisune k prsu, umístěte hadičku pod jeho horní ret, aby přijalo jak bradavku tak hadičku. Jestliže máte z počátku potíže se správným umístěním hadičky, buďte trpělivá a opakujte postup znovu.
9. Na začátku jemně stlačujte láhev, aby se hadičky naplnily mlékem a dítě nepolykalo kolo vzduch.

### Čištění:

SNS musí být čištěn po každém použití.

1. Naplňte láhev teplou mýdlovou vodou, odstraňte přídržný kroužek a hadičky. Hadičky propláchněte proudem vody.
2. Znovu naplňte láhev čistou vodou a propláchněte hadičky proudem vody.
3. Prázdnou láhev několikrát stiskněte, abyste z hadiček odstranili kapky.
4. Systém úplně rozložte a zbývající části omyjte v mýdlové vodě.
5. Řádně propláchněte a osušte na čistém ručníku.
6. Znovu složte.

### Sterilizace:

Před prvním použitím a následně 1x denně:

Před prvním použitím a poté jednou denně musí být SNS sterilizován, resp. vyvařen (nejlépe ráno). Omyjte a opláchněte všechny části. Vložte je do hrnce se studenou vodou (3 cm od okraje). Zakryjte a povařte na 10 minut. Poté vodu vylijte a nechte části zchladit v hrnci bez pokličky. Jednotlivé části vyjměte z hrnce a nechte osušit na čistém ručníku. Abyste předešli vytvoření vodního kamene, přidejte do vody 5 ml kuchyňského octa. Všechny části by měly být řádně opláchnuty ve studené vodě. Všechny části mohou být autoklávovány.

### Umístění hadiček:

Ujistěte se, že má dítě hadičku na středu svého horního rtu a ne v koutku.

### Průměr hadiček:

Děti používající SNS mají odlišné požadavky na průtok mléka. Čím větší je průměr hadičky, tím je průtok mléka vyšší. Začněte na středním průtoku a sledujte polykání dítěte během krmení. Dítě by mělo polykat téměř s každým sáním. Jestliže polyká nepravidelně, zkontrolujte správné umístění hadiček nebo zkuste použít hadičku s větším průměrem.

<u>Tenká hadička</u>	červený ventil
<u>Střední hadička</u>	bílý ventil
<u>Široká hadička</u>	transparentní ventil

### Regulace průtoku:

Průtok může být regulován následujícími způsoby:

- Zvýšení průtoku: - použijte širší hadičku
- umístěte SNS výš
  - mačkejte láhev
  - teplá náhradní výživa
- Snížení průtoku: - použijte užší hadičku
- systém posuňte níž

### Ukončení používání SNS:

Konzultujte s lékařem.

### Výhradní zástupce pro ČR:

DN FORMED Brno s.r.o.  
Hudcova 76a  
612 48 Brno  
Česká republika  
Tel.: 541 321 095  
Fax: 541 321 096  
<http://www.dnformed.cz> ([www.medela.cz](http://www.medela.cz))  
email: [dnformed@dnformed.cz](mailto:dnformed@dnformed.cz)